

Офтальмоскоп HEINE Beta 200 с перезаряжаемой рукояткой, галогенным освещением



1. Колесо для регулировки линз и корректирующие линзы

Корректирующие линзы можно регулировать при помощи регулировочного колеса. Существуют следующие линзы: диоптрии от 0 до + 40 и от 0 до - 35. Показания измерений выводятся на горящем дисплее на панели. Положительные величины выводятся в виде зеленых цифр, отрицательные величины выводятся в виде красных величин.

2. Апертуры

Следующие апертуры могут быть выбраны при помощи колеса настройки апертуры.

Апертура	Функция
Маленький круг или полукруг	для снижения рефлексии малого зрачка
Большой круг	Для стандартного обследования глазного дна
Топографическая сетка	для топографической оценки ретинальных изменений
Светящаяся щель	для исследования рельефа глазного дна

Выбранная апертура будет указана на дисплее на передней панели офтальмоскопа.

3. Фильтр

Если использовать колесо настройки апертуры, то можно использовать следующие фильтры:

Фильтр	Функция
Фильтр без красного спектра	Для увеличения контраста для оценки изменений в тончайших сосудах, например, ретинального кровоизлияния
Синий светофильтр	Для лучшего распознавания аномалий и кровоизлияний в сосудах. Для флюоресцентной офтальмологии.